

ZOLL® AED Plus® --järjestelmän käyttöohje, lisälehti



Tärkeää: Tämä symboli osoittaa, että AED Plus -yksikkö on varusteltu aikuis- ja lapsipotilaiden hoitoon soveltuvaksi. Mikäli AED Plus -yksiköstä puuttuu tämä symboli, ko. yksikkö ei ole varusteltu lasten hoitoon soveltuvaksi ja se ei ole yhteensopiva Pedi-padz® II -merkkisten lapsipotilaiden hoitoon tarkoitettujen elektrodien kanssa. AED Plus -yksikön voi päivittää yhteensopivaksi ZOLL Pedi-padz II -merkkisten lapsipotilaiden hoitoon tarkoitettujen elektrodien kanssa. Lisätietoja tästä päivityspakkauksesta on saatavissa ZOLL Medical Corporation -yhtiöstä tai valtuutetulta ZOLL-jälleenmyyjältä.

Jos AED Plus -yksikkö on varusteltu aikuis- ja lapsipotilaiden hoitoon soveltuvaksi, ja kun ko. yksikön aikuisten elektrodien tarkoitettu kaapeli kytketään, yksikkö kytkeytyy automaattisesti aikuistilaan sydänrytmin määrittämistä varten ja automaattista sokkienergiavalintaa varten (120 joulea, 150 joulea, 200 joulea) ja tuottaa kolme piip-äänimerkkiä ja näyttökehoitteen, *AIKUISEN DEFIEL*. (suom. aikuisten johtimet). Kun kaapeli liitetään ZOLL Pedi-padz II -merkkisiin lapsipotilaiden hoitoon tarkoitettuihin johtimiin, yksikkö kytkeytyy automaattisesti lapsipotilaan hoito -tilaan sydänrytmin määrittämistä varten ja automaattiseen sokkienergiavalintaa varten (50 joulea, 70 joulea, 85 joulea) ja tuottaa kolme piip-äänimerkkiä ja näyttökehoitteen, *LAPSEN DEFIEL*. (suom. aikuisten johtimet).

Pedi-padz II -elektrodien käyttäminen (pikkulasten/lasten hoidossa)


Valmistele potilas ennen Pedi-padz II -elektrodien kiinnittämistä.

Potilaan valmistelu:

1. Paljasta potilaan rinta-alue.
2. Tarkasta, että potilaan rinta on kuiva.

Pedi-padz II -elektrodien käyttö:

1. Revi pakkaus auki ja avaa sisäpakkaus paljastaaksesi elektrodit. Aseta elektrodit potilaaseen pakkauksen sisältämien kuvallisten ohjeiden mukaisesti.
2. Irrota pyöreä elektrodi sen taustamateriaalista ja aseta elektrodi potilaan rinnan päälle (ks. pakkauksen kuvallista esitystä).
3. Aseta kätesi elektrodin reunalle ja käytä toista kättäsi kiertääksesi elektrodi varovasti potilaan rinnan päälle, samalla painaen mahdollinen ilma pois elektrodin alta.
4. Käännä potilas vatsalleen ja poista neliön muotoinen elektrodi taustamateriaalista ja aseta se potilaan selän päälle (ks. elektrodipakkauksen kuvallista esitystä).
5. Aseta kätesi elektrodin reunaan ja käytä toista kättäsi kiertääksesi elektrodi varovasti potilaan iholle, samalla painaen mahdollinen ilma pois elektrodin alta.
6. Käännä potilas selälleen ja noudata ZOLL AED Plus -kehoitteita

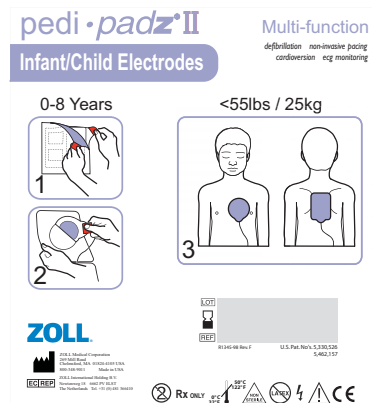

HUOM. Voit käyttää myös Pedi-padz II -elektrodeja (jotka on tarkoitettu pikkulasten/lasten hoitoon) ZOLL-tahdistintuotteiden kanssa jopa yhden tunnin pituisten tahdistusjakson yhteydessä (ks. *M Series Operator's Guide* -oppaan lisätietoja liittyen tahdistamiseen).

Käyttöohjeet

Käytä ZOLL AED Plus -tuotetta, kun potilas, jonka epäillään saaneen sydänkohtauksen, näyttää kärsivän PUUTTEELLISESTA VERENKIERROSTA, josta osoituksena ovat:

- Tajuttomuus, ja
- Epänormaali hengitys ja
- Pulssin puuttuminen tai merkkejä verenkierron pysähtymisestä.

Jos potilas on alle 8-vuotias ja painoltaan alle 25 kg, ZOLL AED Plus -tuotetta tulee käyttää lapsipotilaiden hoitoon tarkoitettujen ZOLL AED Plus -elektrodien kanssa. Hoitoa ei saisi viivästyttää sen vuoksi, että ryhdyttäisiin määrittämään potilaan tarkka ikä ja paino.